

4201-120全自動身長体重計NGP-150L・カーソルの交換方法

日陶科学株式会社
TEL052-935-8976

- ①頭のピンクカバーを取外します。
- ②グレーのプラスチックカバーを身長計スチールからはずし
少しひねりながらカーソルの頭にあたる部分をくぐらせます。




- ③カーソル上部のコネクターをぬきとります。



- ④コネクタ一部コードを外す。



- ⑤外したコネクターの中に「+」ネジ3本がありますのでこれを外す。
(ドライバー「+」の棒が細いもので作業して下さい。)
(ネジは「きつめ」になっています。)
- ⑥新品のカーソルと交換して下さい。
- ⑦3個のネジは「きつく」しめてください。
- ⑧コネクターをつなぎ、グレーカバーをはめて、頭のピンクカバーを取付けは
作業完了です。
- ⑨最後に「1m」のキャリブレーションの操作を行って下さい。
(説明書「4-3」P17ページ掲載)

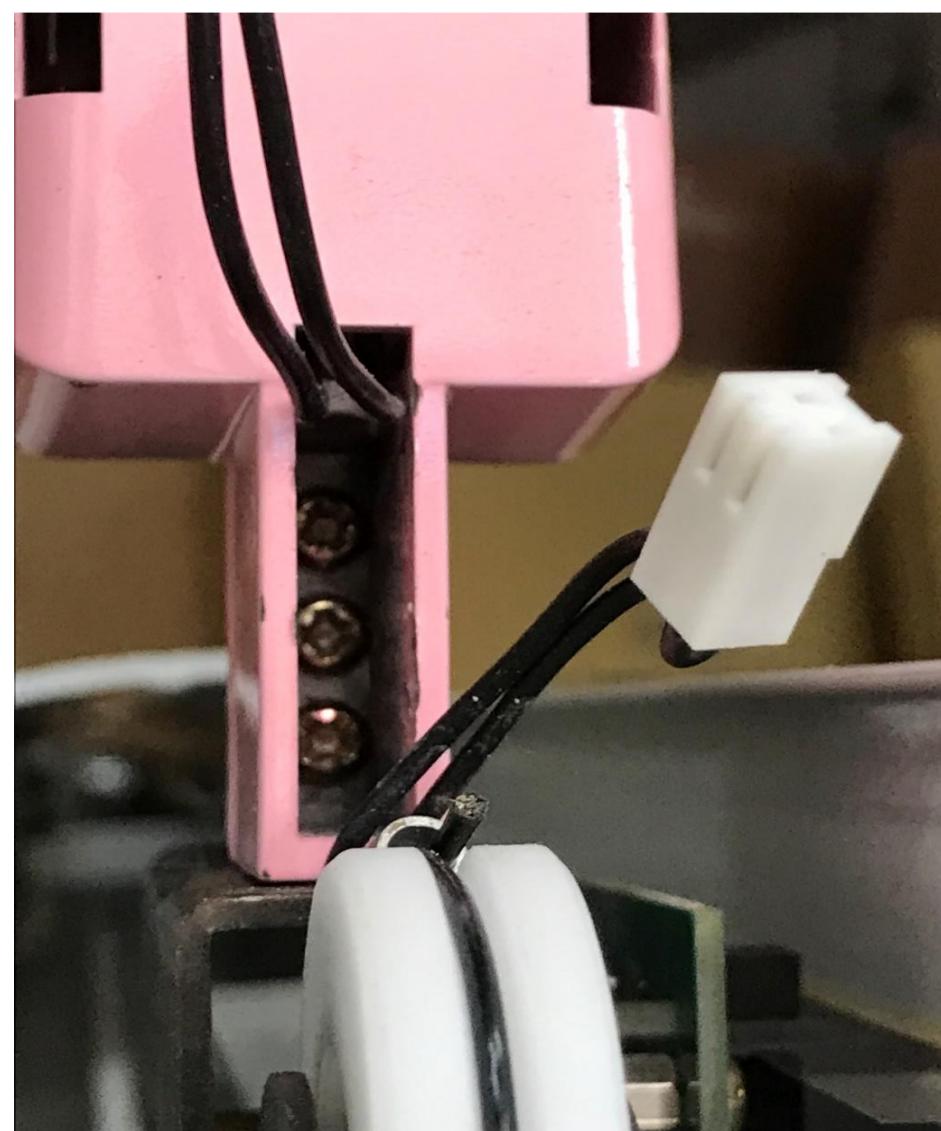



14

