

取扱説明書

歯ブラシ保管庫 NDK-50

この度はニッソー歯ブラシ保管庫をお求め頂き、誠に有難う御座いました。
「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しくご使用ください。

仕様	大きさ	W56.8XD10XH67.5cm
	材質	スチール製メラミン焼付塗装
	電源	AC100 50/60HZ
	消費電力	38W
	殺菌灯	15WX2本
	タイマー	60分・連続運転可
	歯ブラシ	50本掛け
	付属品	水受け2個付

- 特長
- 本機は衛生的に殺菌ができて歯ブラシの保管ができます。
 - タイマーの連続運転は繰り返しのご利用の場合に便利です。
(扉を開け、殺菌灯が消灯していることを確認の上、歯ブラシの交換をしてください。
照射時間を10～15分を計り繰り返し行って下さい。
ご利用後はコンセントを抜いて下さい。)

- 使用方法
- 歯ブラシはフックに収納して下さい。
(収納するときは必ず歯ブラシをよく洗い、水分を切って下さい。)
 - 収納後、扉をしっかりと閉じてタイマーを10～15分に合わせて照射して下さい。
(リミットスイッチが付いていますので扉を閉じた時に点灯します。開けると消灯します。)
 - 長時間の照射は効果が上がらないばかりか、殺菌灯の寿命が短くなったり、歯ブラシが痛んだりしますのでご注意ください。
 - ご使用されない場合はコンセントを抜いて下さい。
 - 殺菌灯の光「紫外線」は目に悪いので直視しないで下さい。
 - 歯ブラシを保管中に生じる場合がありますので、扉をあけて換気を行って下さい。
(ご使用しないときや換気を行う場合は必ずコンセントを抜いて下さい。)
 - 殺菌灯の寿命は約4000時間ですが約3000時間を過ぎ始めたころから効果が低下しますので早目にお取替をして下さい。

注意) 扉を開けると殺菌灯が消灯する構造になっておりますが、万が一、扉を開けても殺菌灯が点灯している場合は、即刻使用を取り止め、弊社販売代理店にご相談ください。

日陶科学株式会社
本 社 TEL 052-935-8976
東京支店 TEL 03-3974-8931